




# ALLES SPÜLT

## ANLEITUNG ZUM PCR-TEST IN DER SCHULE

Alle Informationen zu ALLES SPÜLT gibt's unter: [www.bmbwf.gv.at/allesspuelit](http://www.bmbwf.gv.at/allesspuelit)

### WICHTIG

30 MINUTEN VOR DEM TEST NICHT ZÄHNE PUTZEN, KAUGUMMI KAUFEN, TRINKEN, ESSEN ODER RAUCHEN.

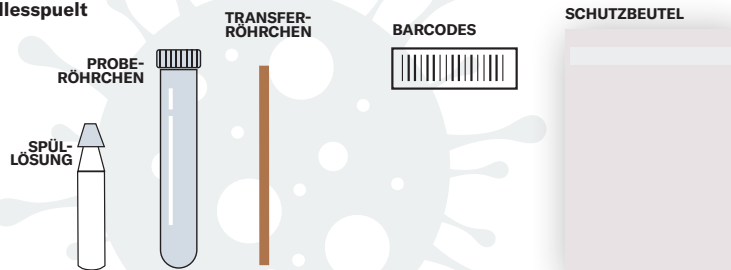

SICHERE SCHULE  
[www.sichereschule.at](http://www.sichereschule.at)

Bundesministerium  
Bildung, Wissenschaft  
und Forschung

**COVID-19 NACHGEWIESEN**  
DIE SCHULE INFORMIERT DIE SCHÜLERIN/  
DEN SCHÜLER, DIE ELTERN/  
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DAS LABOR.

**COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN**  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

# 1

- Löse einen Barcode vom Bogen
- Klebe ihn der Länge nach auf das Röhrchen (NICHT herumwickeln)
- Öffne das Proberöhrchen und lege es vor dir auf den Tisch

# 2

- Öffne den Behälter mit der Spüllösung
- Leere die Flüssigkeit in den Mund
- Spüle die Flüssigkeit 1 Minute im gesamten Mundraum im Kreis

# 3

- Spucke die Flüssigkeit über das Transferöhrchen in das Proberöhrchen

# 4

- Verschiebe das Proberöhrchen mit der Verschlusskappe

# 5

- Gib die Probe in den Schutzbeutel und verschließe ihn gut

# 6

- Gib die Probe in den Sack